


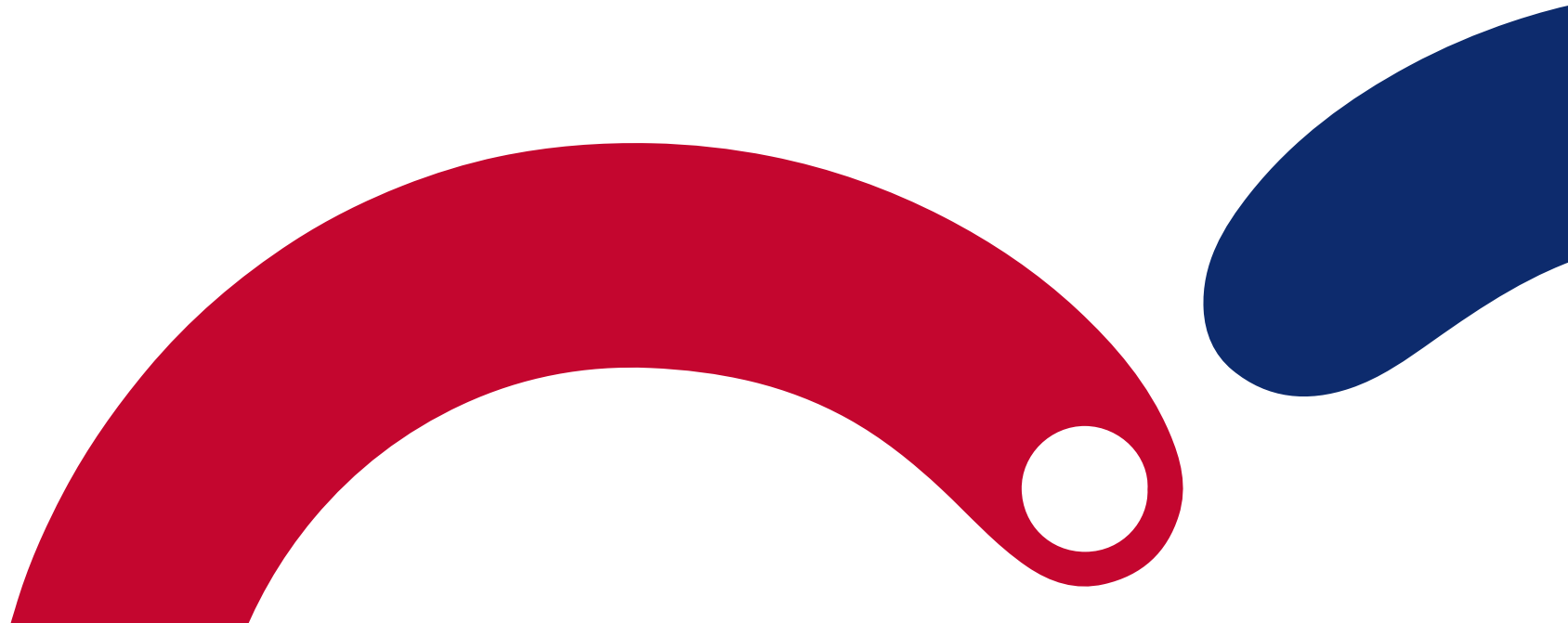

Система для зшивання судин ZYLOX



Огляд товару



Призначення: для накладання одинарної поліпропіленової мононитки для закриття місця пункції стегнової артерії після діагностичної/терапевтичної катетеризації.

Показання: для використання у пацієнтів, які проходять інтервенційну катетеризацію або лікування з використанням оболонок від 5F до 22F для постпроцедурного черезшкірного накладання швів для закриття місця пункції загальної стегнової артерії. Для розмірів оболонки понад 8F потрібні мінімум два інструменти для накладення швів разом із технікою попереднього зав'язування швів.

Переваги: порівняно з традиційним компресійним гемостазом використання пристрою значно скорочує терміни післяопераційного гемостазу та ліжкового режиму хворого, має менше ускладнень, простий у виконанні, має надійну гемостатичну дію.



Компоненти




Система складається з двох частин:


1 Пристрій для зшивання судин
Перфораційний шов судинної системи стегнової артерії після діагностичної/терапевтичної катетеризації.

2 Пристрій для обрізання вузлів
Просуньте та зафіксуйте попередньо зав'язаний вузол під шкірною тканиною в місці проколу, обріжте надлишок шва через вбудовану трубку для обрізання ниток.

Пристрій для обрізання вузлів

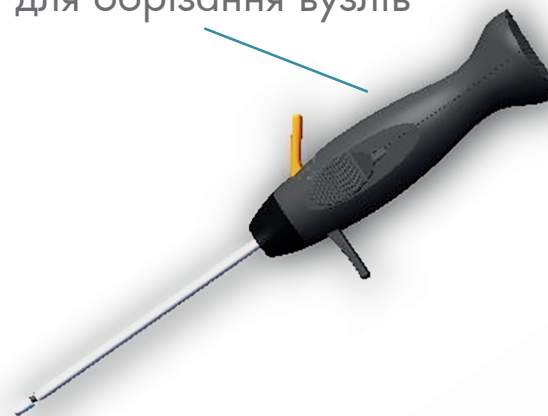

Пристрій для зшивання судин

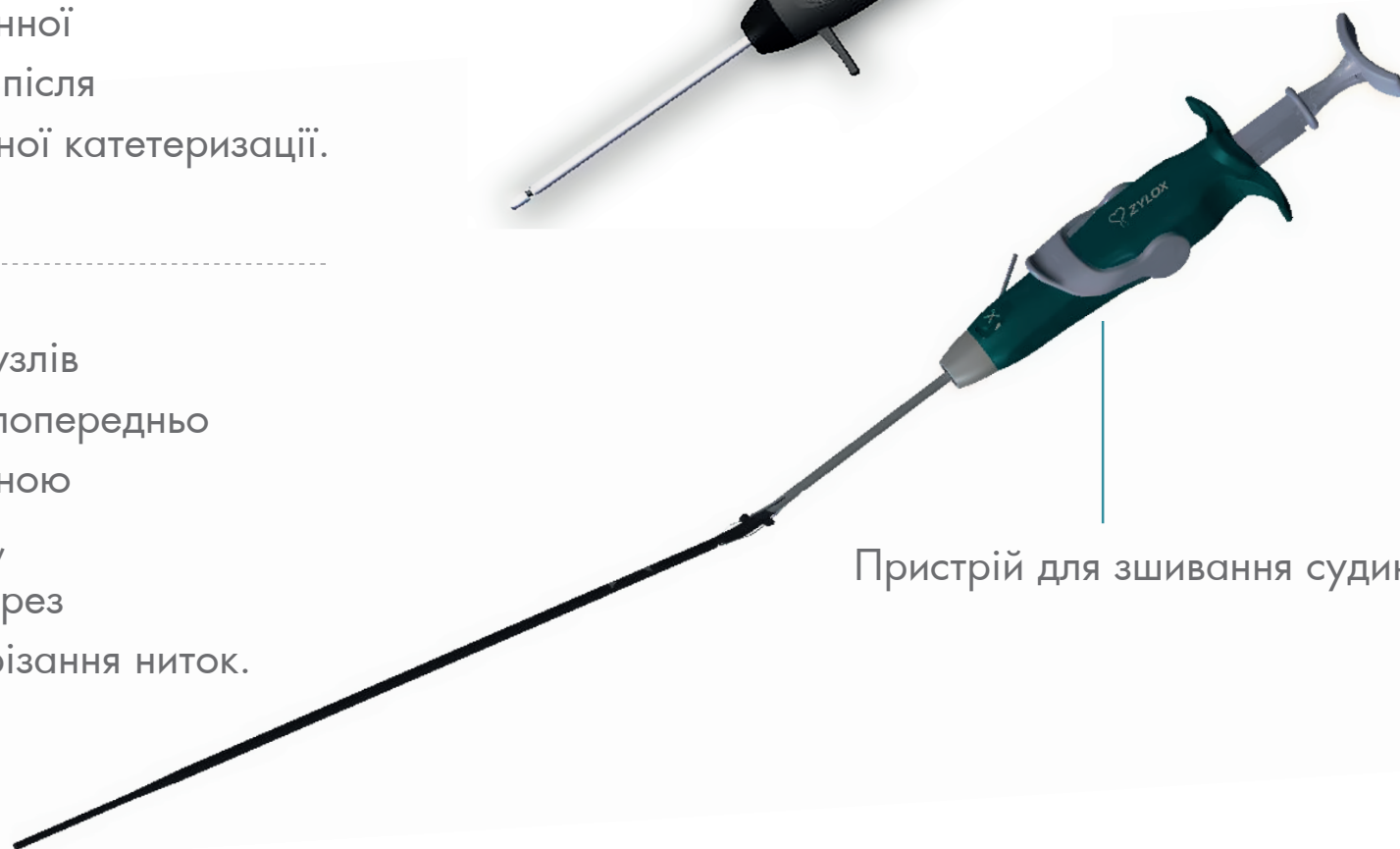

Компоненти пристрою для зшивання судин




1. Дистальні катетери



Компоненти пристрою для зшивання судин




2. Пристрої для стикування

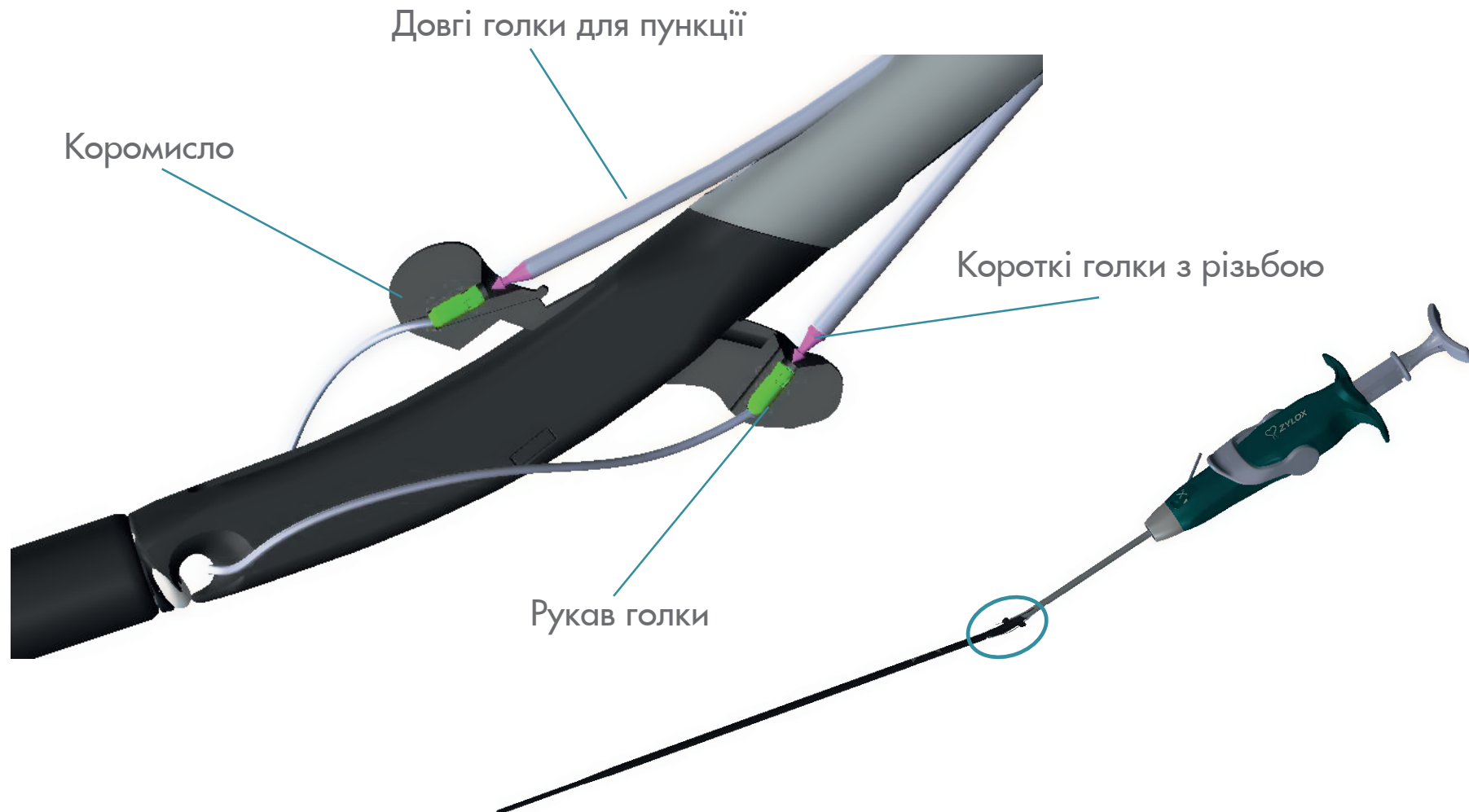

Компоненти пристрою для зшивання судин



3. Вузли нитки

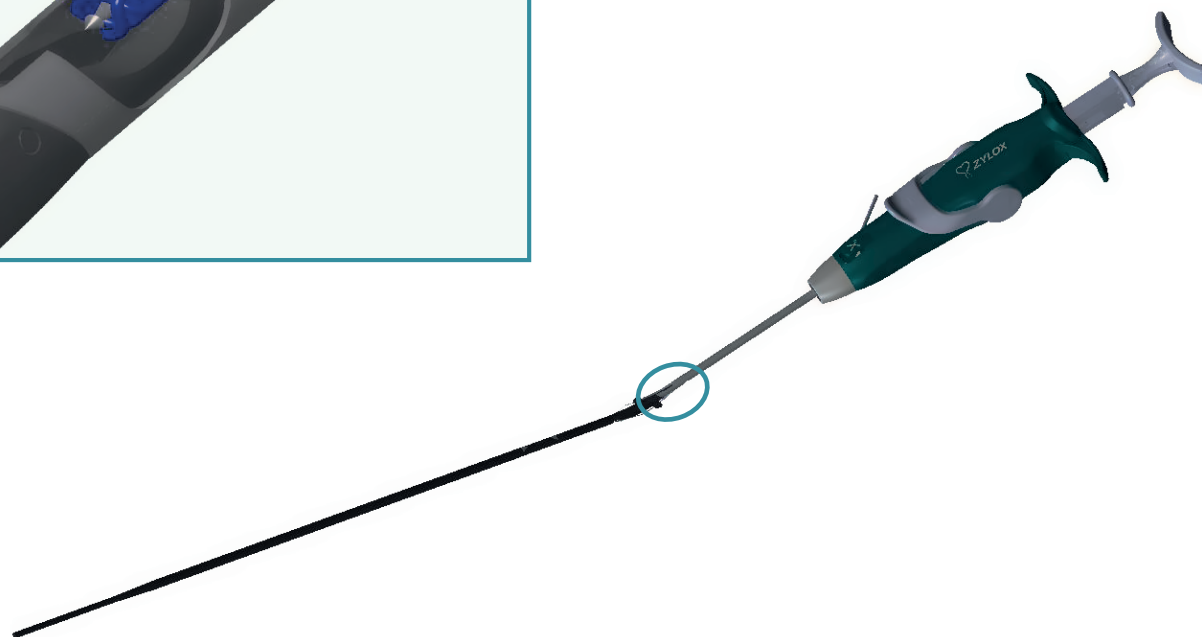

Компоненти пристрою для зшивання судин



4. Зовнішня оболонка



Пристрій для обрізання вузлів



Попередньо зав'язаний шов



Для оболонок розміром понад 8F потрібні щонайменше два інструменти для накладення швів разом із технікою попереднього зав'язування швів, у якій шов накладається на місце проколу на початку процедури, а вузол можна безперервно просувати до завершення процедури.

Перший
Повернути на 30° відносно правого боку пацієнта



Другий

Положення 12:00





Розгортання двох пристроїв


**Розгортання кількох пристроїв
(необов'язково)**

Пристрій для обрізання вузлів

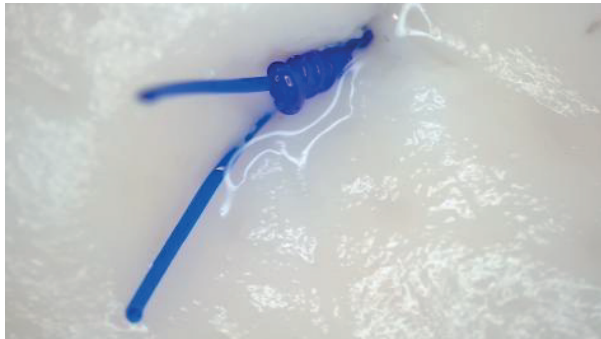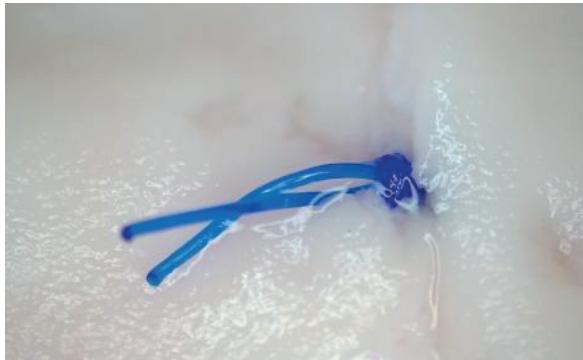


	Розгортання одного пристрою	Розгортання двох пристроїв
Zylox Suture Тестова група	 A close-up photograph of a single blue suture thread with a knot, laid out on a light-colored, textured surface.	 A close-up photograph of two blue suture threads with knots, laid out on a light-colored, textured surface.
ProGlide Suture System Контрольна група	 A close-up photograph of a single blue suture thread with a knot, laid out on a light-colored, textured surface.	 A close-up photograph of two blue suture threads with knots, laid out on a light-colored, textured surface.

Анатомічні зображення

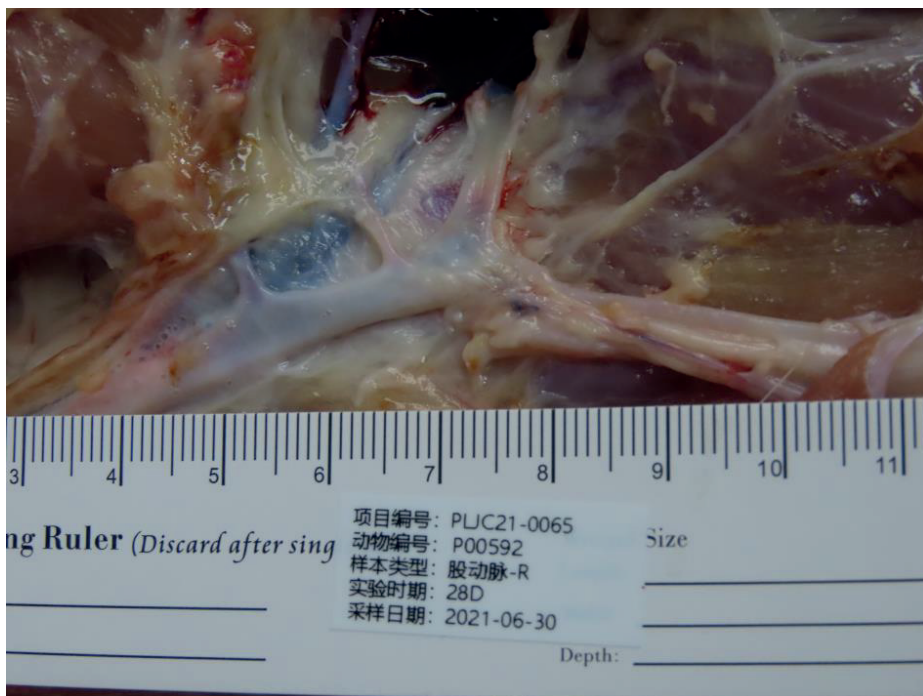

Система зшивання

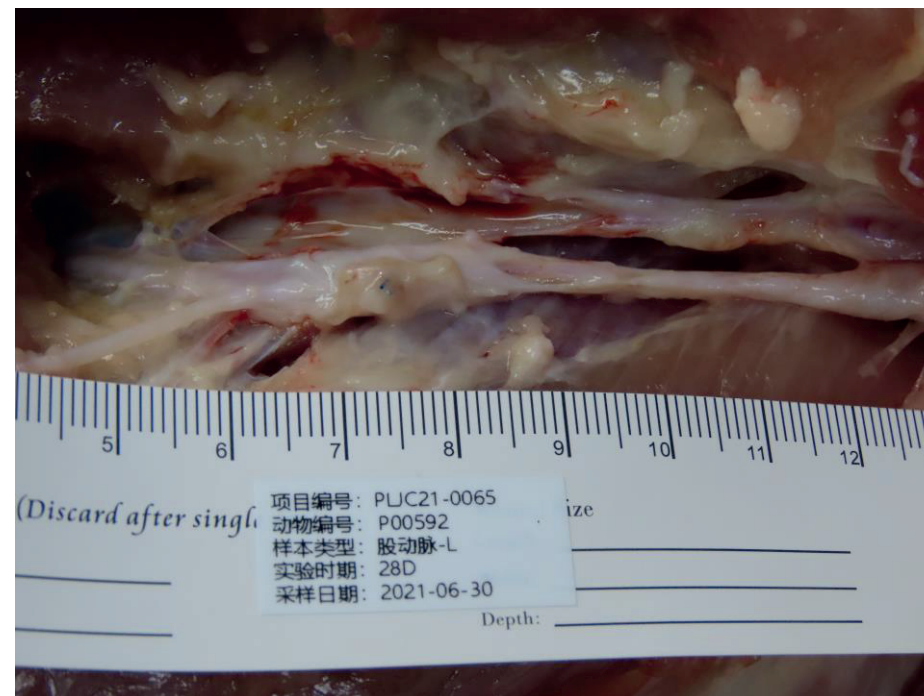

Система зшивання ProGlide
(контрольна група)

Анатомічні результати показують, що як тестова, так і контрольна групи змогли зашити отвір проколу з порівнянними результатами, і не було виявлено жодних аномалій навколо шва.



Zhejiang Zylox Medical Device Co., Ltd

BLDG 1 , No.18 Technology AVE, Wenyi West Road, Hangzhou, P. R. China, 311121

Тел.: (+86) 571 8861 0082 Факс: (+86) 571 8861 0608 info@zyloxmedical.com

www.zyloxmedical.com